

最新の「ペン型オールインワン抗原検査キット」が登場!

在庫に限りがあるため、お早めにご注文ください

最新のペン型
オールインワン
抗原検査キット

陽性の方は
無料で
PCR検査

唾液を
採取するだけ
カンタン
検査!

外部へ
飛散するリスクが
極めて少ない
構造!

約15分で
検査結果が
分かる!

変異株
対応!*

*N501Y・L452Rの
変異株の検出が
確認済み



※本品は研究用であり、体外診断用医薬品ではありません。
医薬品としての臨床的有用性は確認されておりません。

製品名 **新型コロナウイルス抗原検査ペン型デバイス**

価格 **1,848円(税込)**

〈本体サイズ〉(約)H150×W21×D21mm 〈セット内容〉試験紙付き唾液コレクター×1、抽出パuffa×1、乾燥剤×1、
使用説明書×1 〈仕様〉判定時間：約15分 保管温度：室温(2-30℃) 有効期限：製造より2年 〈検出精度〉99.4%以上※
※当社PCR検査との比較実験(陽性50検体：陰性50検体)では、陽性陰性一致率100%。実験の方法・結果は医師の確認・証明を受けています。(あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いないでください。)

本製品だけの
限定特典

本検査キットを使用して陽性の方は
無料でPCR検査を致します。

24時間 365日

日本全国どこでも
すぐお届け回収!!

東亜産業 PCR検査センター

詳しくはこちら▶



ご注文番号	品名	価格	ご注文数
TOA-CAR-TS	新型コロナウイルス抗原検査ペン型デバイス	1,848円(税別1,680円)	個
貴社名	ご注文日 年 月 日 ご担当者名	在庫に限りがあるため、お早めにご注文ください ご注文・お問い合わせは	
TEL		 株式会社 オー・エフ・ケイ オフィス工房 パソコン修理の専門店 パソコンドック24 出雲店 TEL:0853-25-8681 FAX:0853-25-8682	

本検査キットを使用して陽性の方は
無料でPCR検査を致します。

東亜産業 PCR検査センター

詳しくはこちら▶



検査キットの使用手順




口の中をコレクターで拭い、しっかり唾液をしみこませてください。約2分間程度が目安です。

幾何学模様が抽出バッファに入るまで強く押し込んでください。

約15分間色つきのラインが表示されるまで待ちます。

【検査結果表示】

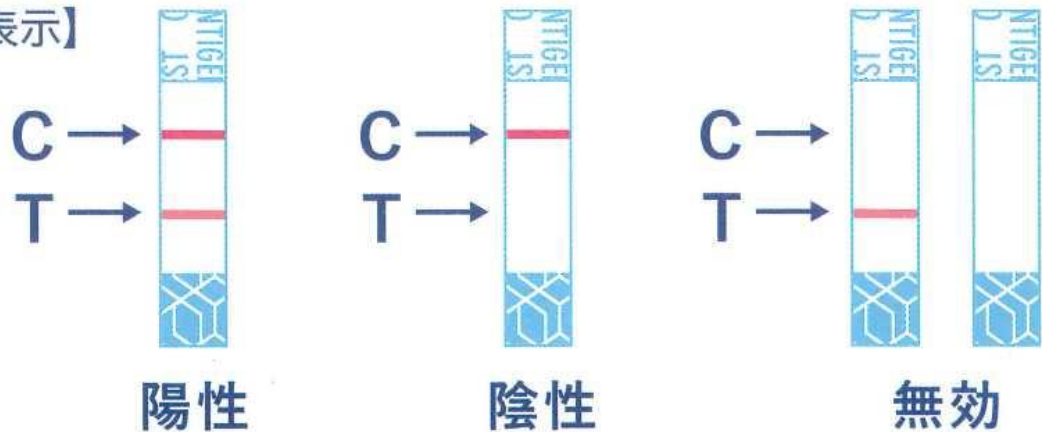

使用上の注意

【使用目的】

本品は研究用試薬です。この製品で得られた結果の臨床的有用性については確立されていないため、診断(感染しているかどうかの判断)等の目的では使用しないでください。

●新型コロナウイルス抗原検査 ペン型デバイス (以後、本品)はイムノクロマト法による抗原検出試薬です。検体に含まれるSARS-CoV-2のヌクレオカプシド蛋白質抗原の定性検出の判別を行います。

●この検査の結果は診断等の判断の材料に用いることはできません。本品で反応がある場合は、かかりつけ医又は地域のルールに従い、発熱相談窓口等にご相談ください。なお、本品で反応がなかったとしても、SARS-CoV-2感染を否定するものではありません。

【ご注意事項】

- 本品は研究用としての使用に限定されます。
- 本品は使用の直前までパウチから開封しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品を使用しないでください
- パウチが破損していたり、開いていたりした場合は使用しないでください。
- 検査デバイスは使い捨てです。

●緩衝液は防腐剤(0.09%のアジ化ナトリウム)を含みます。皮膚や目に触れた場合は十分な量の水で洗い流してください。

●アジ化ナトリウムを含む溶液は鉛や銅に対して爆発的に反応する可能性があります。廃棄の際は大量の水を使用してください。

●各テストを実行する際、検体を取り扱う際は適切な防護用具や手袋を使用するなどバイオハザード対策を請ってください。

●検体の採取と処理は手順に従う必要があります。使用説明書通りの手順を行わないと結果が不正確になる可能性があります。

●正確な結果を得るためには目視できるほどの血の混じった検体や過度に粘性のある検体を使用しないでください。

●SARS-CoV-2の検体を扱う際は常に実験室にて適切な安全手順に従う必要があります。使用されたデバイスは感染源となる可能性があります。地域の規制要件に従い、適切に取り扱い、廃棄をお願いいたします。

●規定以外の温度での保管は結果に悪影響を及ぼす可能性があります。